

# Protac H-Kissen

- ein speziell geformtes Lagerungskissen mit der Möglichkeit zur Seitenlage

Das Lagerungskissen ist symmetrisch geformt, unterstützt so beide Seitenlagen und ermöglicht auch einen Wechsel zwischen verschiedenen Liegepositionen. Die spezielle H-Form stabilisiert das Kissen besonders. Zudem hilft das H-Kissen Ödemen vorzubeugen, durch die Hochlagerung und Entspannung der unteren Extremitäten. Das H-Kissen wurde in Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Ärzten und Patienten des Spitals Århus in Dänemark entwickelt und wird auch dort hergestellt.

## Hüftoperation

Das H-Kissen sichert die korrekte Haltung und Lagerung der unteren Extremitäten nach einer Hüftoperation. In den ersten drei Monaten nach der Operation darf das neue Gelenk nur bis zum rechten Winkel (90°) gebeugt werden. Starke Rotationsbewegungen, Kreuzen oder Übereinanderlegen der Beine, müssen vermieden werden. Das H-Kissen kann dies gewährleisten durch die stabile und parallele Lagerung der Beine. Es gestattet dem Patienten auch auf der operierten Seite zu liegen, ohne diese zu verletzen. Das H-Kissen ermöglicht einen günstigeren Genesungsverlauf mit effektiverer Ruhe, Erholung und weniger Schmerzen.

## Spastizität

Insbesondere Kindern und Erwachsenen mit spastisch erhöhtem Muskeltonus bietet das H-Kissen grossen Komfort. Im Liegen bleiben die Beine durch das H-Kissen voneinander getrennt und die Spastizität wird dadurch hemmend beeinflusst. Das H-Kissen stellt dabei sicher, dass sich an den Kondylen des Knies keine Druckstellen bilden. Das H-Kissen lässt sich auch als Transfer- und Umlagerungshilfe verwenden. Bei dem Transfer, zum Beispiel vom Bett in den Rollstuhl, wird das H-Kissen zur Hemmung der Spastizität, zwischen die Beine platziert.

## Andere Anwendungsmöglichkeiten

Das H-Kissen lässt sich auch in Bauchlage verwenden oder kann in Rückenlage, zur Entlastung des Rückens, unter die Knie gelegt werden. Für die Lagerung der Extremitäten bei Lähmungen ist die Stabilität des Kissens sehr vorteilhaft.

## Produktbeschreibung

Das H-Kissen besteht aus atmungsaktivem, wasserabweisendem Material und ist mit Polypropylenkugeln gefüllt. Kissenbezug: 100% Baumwolle. Es lässt sich in einer Industriemaschine (Kapazität mindestens 16 kg) bei max. 80° oder von Hand waschen.



Das H-Kissen kommt zur Anwendung bei:

Hüftoperationen

Beckenfrakturen

Spastizität

Lähmungen

Rückenverletzungen

Knie-, Fuss- und Beinverletzungen

Schwangeren mit Symphysenlockerung

Lagerungsproblemen

Umlagerung



**northcare**  
Nydegger  
Zimmerwaldweg 15  
CH - 3123 Belp  
Tel +41 031 812 08 37  
mail@northcare.ch  
www.northcare.ch



# Protac H-Kissen

## Auswahl

Medium	Länge 65 cm	Diameter "Flügel" 18 cm	Art Nr. 401-M
Small	Länge 55 cm	Diameter "Flügel" 18 cm	Art Nr. 401-S
Junior	Länge 55 cm	Diameter "Flügel" 14 cm	Art Nr. 401-J
Kind	Länge 40 cm	Diameter "Flügel" 12 cm	Art Nr. 401-B



## Protac H-Kissen Mieten

Das H-Kissen kann auch gemietet werden. Das ist ökologisch sinnvoll und praktisch, da ein Hilfsmittel häufig nur für ein paar Wochen oder Monate gebraucht wird

### Mietpreisliste H-Kissen inkl. Überzug

	Mietpreis pro Monat
Art Nr. 401-Medium	CHF 25.00
Art Nr. 401-Small	CHF 25.00
Art Nr. 401-J (Junior)	CHF 20.00
Art Nr. 401-B (Kind)	CHF 20.00
Mietbedingungen:	Die Mindestmietdauer beträgt 1 Monat
Mietgebühren:	Für vermietete Hilfsmittel wird eine Grundgebühr von CHF 25.- und mindest eine Monatsmiete berechnet.
Miete/Kauf:	Bei einem späteren Kauf, wird ein Teil der Miete angerechnet.
Weitere Bedingungen:	Bei Verlust oder Schäden, welche über normale Gebrauchsabnützungen hinausgehen, ist der Mieter haftbar.