

Protac Kugeldecke

- ein beruhigendes und die Sinne stimulierendes Hilfsmittel

Die Kugeldecke stimuliert die Sinne, vor allem Oberflächen- und Tiefensensibilität, und erhöht das Körperbewusstsein. Die Kugeldecke wurde im Rahmen der sensorischen Integrationstherapie der amerikanischen Ergotherapeutin und Psychologin A. Jean Ayres entwickelt. Das Wirkungsprinzip der Kugeldecke besteht darin, dass das Gewicht der Kugeln punktuellen Druck auf den Körper ausübt und dadurch sowohl der Berührungssinn als auch der Muskel- und Gelenksinn stimuliert werden. Die vielen Sinneseindrücke senden hemmende Impulse an das Zentralnervensystem. Dies intensiviert die Wahrnehmung für den Körper und dessen Grenzen und schafft ein Gefühl von Geborgenheit. Aus diesem Grund wirkt die Kugeldecke beruhigend.

Die Kugeldecke bietet viele Anwendungsmöglichkeiten für alle Menschen mit verminderter Körperwahrnehmung, körperlicher und psychischer Unruhe. Sie kann wie eine gewöhnliche Bettdecke verwendet werden. Sie hilft und unterstützt auch für kürzere Zeit tagsüber oder am Abend, um zur Ruhe zu kommen. Die Kugeldecke ist ein wirksames Hilfsmittel bei Einschlaf- und Durchschlafstörungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Spielerisches Hilfsmittel


Kinder lieben es, mit der Decke zu spielen. Sie können sich unter der Decke verstecken, eine Höhle bauen oder sich in die Decke einrollen. Die Stimulation der Kugeln schafft Ruhe und erhöht die Aufmerksamkeit des Kindes. Ein verstärktes Konzentrationsvermögen verbessert die Wirkung des sensomotorischen Trainings und erleichtert das Lernen.

Die Kugeldecken sind mit verschiedenen Arten von Kunststoffkugeln gefüllt:

- Die mit Kunststoffkugeln (49mm oder 37mm) gefüllte Decke ist die schwerste. Das Gewicht bewirkt den stärksten taktilen Reiz und somit auch die ausgeprägteste Sinnesstimulierung.
- Die mit einer Mischung aus Kunststoffkugeln und Polystyrolkugeln gefüllte Decke ist etwas leichter und eignet sich für alle, die eine etwas weniger starke Sinneseinwirkung brauchen.
- Die mit Polystyrolkugeln gefüllte Decke erzeugt die leichteste Stimulierung.

Die Kugeldecke kommt u.a zur Anwendung bei:

ADHS
Angst
Anorexie
Apoplexie
Autismus
Ataxie
Cerebrale Lähmung
Demenz
Depression
Entwicklungsstörungen
Epilepsie
Frühgeborene
Geistige Behinderung
Hirnverletzungen
Chorea Huntington
Hyperaktivität
Konzentrationsprobleme
Mehrfachbehinderung
Missbrauch
Multiple Sklerose
Zwangssyndrom
Parkinson
Psychosen
Sinnesstörungen
Schizophrenie
Schmerzen
Spastizität
Stress
Schlafstörungen
Wahrnehmungsstörung
Taubblindheit

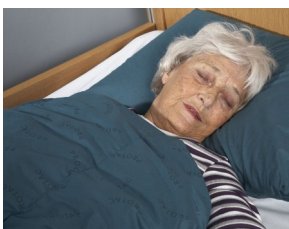

northcare

Zimmerwaldweg 15
CH-3123 Belp
Tel +41 031 812 08 37
mail@northcare.ch
www.northcare.ch



Protac Kugeldecke

Anwendungsbereiche

Die Kugeldecke bietet viele Anwendungsmöglichkeiten: Sie kann wie eine gewöhnliche Bettdecke verwendet werden, indem sie eng um den Körper gelegt wird. Viele verwenden die Decke auch tagsüber für kurze Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Man kann sich zum Beispiel auf sie legen, sich darauf setzen oder sich in sie einwickeln. Probieren Sie ruhig aus, was für Sie am besten funktioniert.

Dauer der Anwendung

Die Anwendungsdauer hängt sowohl vom Bedarf an Sinnesstimulierung als auch davon ab, wie intensiv die Sinnesreize aufgenommen werden. Wer die Kugeldecke als angenehm empfindet, wird unter dem punktuellen Reiz der Kugeln schnell zur Ruhe kommen. Es kann aber bis zu zwei Wochen dauern, bis eine Wirkung spürbar ist. Wichtig ist es, auf eine eventuelle Überstimulation zu achten; diese kann sich zum Beispiel durch ein verstärktes Schlafbedürfnis bemerkbar machen, aber auch als Gefühl von Eingeengtsein oder Hyperaktivität. Viele Anwenderinnen und Anwender schlafen jede Nacht mit der Kugeldecke, während andere sie nach Bedarf benutzen, um zur Ruhe zu kommen.

Gewöhnung an die Kugeldecke

Wir empfehlen Ihnen eine langsame Gewöhnung an die Kugeldecke und schlagen deshalb vor, die Decke anfänglich jeweils nur für kurze Zeit zu verwenden. Danach kann die Anwendungsdauer langsam gesteigert werden, entsprechend den individuellen Erfahrungen. Für Kinder kann es hilfreich sein, mit der Decke erst einmal zu spielen. So erfahren sie selber, dass die Kugeldecke Spaß macht und sie sich angenehm anfühlt. Auch für Angehörige und Personal ist es empfehlenswert, die Kugeldecke auszuprobieren, um die Wirkung am eigenen Leib zu spüren.

Produktbeschreibung

Die Kugeldecke ist in kleinere Kammern aufgeteilt, die mit Kunststoffkugeln und/oder Polystyrolkugeln gefüllt sind. Der Bezug besteht aus reiner Baumwolle oder Trevira CS. Trevira CS ist ein flammhemmendes Textil und entspricht den Anforderungen der skandinavischen Brandschutznorm «NT FIRE 037». Kugeldecken mit Polystyrolkugeln enthalten Kleinteile und sollten deshalb von Kindern unter drei Jahren nur unter Aufsicht verwendet werden.

Reinigung und Pflege

Für die Kugeldecke empfehlen wir die Verwendung eines Bettbezuges, um die Pflege zu erleichtern. Die Kugeldecke lässt sich in einer Industriewaschmaschine (Kapazität mindestens 16 kg) oder von Hand waschen. Beachten Sie die Reinigungsanleitung auf der Kugeldecke.

Hinweis

Die Protac Kugeldecke ist patentrechtlich geschützt.