

Protac Kugelkissen

- gibt Impulse für eine gute Sitzhaltung und fördert die Aufmerksamkeit

Das Kugelkissen führt zu dynamischem und aufrechtem Sitzen und stimuliert den Gleichgewichtssinn. Das Kugelkissen wurde auf Grundlage der sensorischen Integrationstherapie der amerikanischen Ergotherapeutin und Psychologin A. Jean Ayres entwickelt. Aufgrund der Flexibilität der Kugeln bewegt sich der Körper über seiner Körpermitte. Das Gehirn erfasst die feinen Bewegungen reflektorisch und sendet, um das Gleichgewicht zu halten, Signale mit ebenso feinen Gewichtsverlagerungen. Dadurch wird die posturale Muskulatur stimuliert, der Körper erhält laufend Impulse sich aufzurichten, was wiederum die Konzentration steigert. Ausserdem vermittelt der punktuelle Druckreiz der Kugeln Informationen über die Körperhaltung (Lage, Anspannung und Bewegung des Muskel- und Skelettsystems) und fördert so die Körperwahrnehmung.

Dynamisches Sitzen verbessert die Lernfähigkeit

Vielen Kindern macht es Spass, auf dem Kugelkissen zu sitzen. Besonders gilt dies für motorisch unruhige Kinder und solche mit Konzentrations- und Lernproblemen. Das Kugelkissen empfiehlt sich aber grundsätzlich für alle Schulkinder, da das aktive Sitzen den Rücken entlastet.

In der Therapie wird das Kugelkissen zum Gleichgewichts- und Sensibilitätstraining bei Kindern und Erwachsenen eingesetzt. Zum sensomotorischen Training lässt es sich gut in der Hängematte oder als zusätzliche Stimulation unter den Füßen verwenden.

Das Kugelkissen ist in verschiedenen Grössen erhältlich, passend auf den Schul- und Kindergartenstuhl, Tripp-Trapp-Stuhl und den Hocker.




Das Kugelkissen wird u.a eingesetzt bei:

ADHS
Hyperaktivität
Gleichgewichtsproblemen
Konzentrationschwierigkeiten
Lern- und Leistungsstörungen
Cerebrale Lähmung
Vermindertem Tonus der
Haltungsmuskulatur



northcare

Zimmerwaldweg 15
CH-3123 Belp
Tel +41 031 812 08 37
mail@northcare.ch
www.northcare.ch

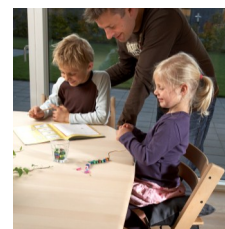

Auswahl

Kugelkissen mit 38 mm grosse Kugeln

- 40x40 cm für Stuhl mit 4 Beine, Art.Nr 201-10-38
- 40x40 cm für den Schulstuhl, Höhenverstellbar mit Standrohr/Sternfuss, Art.Nr 201-15-38
- 40x40 cm aufgeteilt in vier Felder, für Stuhl mit 4 Beine, Art.Nr 201-10-4-38
- 29x45 cm für Tripp-Trapp-Stuhl, Art.Nr 201-11-38
- 36x45 cm für Tripp-Trapp-Stuhl / Fusstütze, Art.Nr 201-11-L-38
- 30x35 cm für Kindergartenstuhl, Art.Nr 201-12-38
- 30x30 cm für Hocker, Art.Nr. 201-13-38
- 35x35 cm für Hocker, Art.Nr. 201-14-38

Kugelkissen mit 25 mm grosse Kugeln

Dieses Kissen empfehlen wir z. B. für Anwender, die sehr schlank sind.

- 40x40 cm für Stuhl mit 4 Beine, Art.Nr 202-10-25
- 40x40 cm für den Schulstuhl, Höhenverstellbar mit Standrohr/Sternfuss, Art.Nr 202-15-25
- 40x40 cm aufgeteilt in vier Felder, für Stuhl mit 4 Beine Art.Nr 202-10-4-25
- 29x45 cm für Tripp-Trapp-Stuhl, Art.Nr 202-11
- 30x35 cm für Kindergartenstuhl, Art.Nr 202-12-25
- 30x30 cm für Hocker, Art.Nr. 202-13-25
- 35x35 cm für Hocker, Art.Nr. 202-14-25

Der Unterschied von 38 mm und 25 mm grosse Kugeln in den Kissen

Die grösseren Kugeln (38 mm) bietet mehr Bewegung, einen stärkeren punktuellen Druck der Kugeln und damit die stärkste sensorische Stimulation.

Das Kissen mit den kleineren Kugeln (25 mm) hat eine gröss-ere Auflagefläche, ist stabiler und ergibt somit auch weniger taktile Stimulation.

Ein Kissen ist in 4 Felder

aufgeteilt/abgesteppt, damit die Kugeln weniger flexibel sind. Somit wird das Kissen stabiler. Dies ist vorteilhaft für Anwender mit grossen Gleichgewichtsproblemen oder bei mangelnder Rumpfstabilität.

Das Kugelkissen muss auf einer harten Unterlage benutzt und verlässlich festgebunden werden, damit es die volle Sinnesstimulierung und Wirkung bietet. Die Kugeln sollten auf einer Ebene, nebeneinander liegend, angeordnet werden. Ebenfalls wichtig ist, dass die Füsse am Boden gut gestützt werden.

Dauer der Anwendung

Das Kugelkissen kann täglich benutzt werden (Häufigkeit und Dauer je nach Bedarf). Bei Lähmungen oder Oberflächensensibilitätsstörungen empfiehlt sich eine kürzere Anwendungsdauer um Druckstellen zu vermeiden.

Produktbeschreibung

Die Kissenhülle besteht aus 100% CS Polyester (flammhemmend) und ist mit Kunststoffkugeln gefüllt. Auf der Unterseite sichert rutschfestes Material, dass das Kissen auf dem Sitz haftet. Die Bänder werden um die Stuhlbeine und beim Tripp-Trapp- und Standrohr/Sternfuss-Stuhl unter dem Sitz gebunden. Das Kugelkissen ist waschmaschinenfest (40°).