

## Reinigung Protac Kugeldecken™

Sämtliche Decken können bis max. 60° gewaschen werden.

- Waschmittel ohne Bleichmittel verwenden.
- Schleuderdrehzahl der Waschmaschine auf ein Minimum einstellen um unnötige Reibung zwischen Stoff und die harten Kugeln zu vermeiden.

Siehe im Übrigen die Waschanleitung in der Decke.

Intervall und Bedarf für die Wäsche hängen von Anwendung und Gebrauch ab. Bei Reinigung und Pflege der Kugeldecke ist die untenstehende Anleitung zu befolgen. Es wird empfohlen, die Decke regelmäßig zum Lüften aufzuhängen.

### Protac Kugeldecke™ Serie Granulat und Traditionell

- Artikelnummern 100-101, 100-102, 100-105, 100-106, 100-109, 100,110 können in einer Waschmaschine mit einer Mindestkapazität von 16 kg gewaschen werden.
- Artikelnummern 100-119 mit Polypropylen-granulat sollen zweigeteilt und jeder Teil in einer Waschmaschine mit einer Mindestkapazität von 6 kg gewaschen werden. Wäschebeutel oder Wäschenetz verwenden falls vorhanden.
- Artikelnummern 100-107 Baby können in einer Waschmaschine mit einer Mindestkapazität von 6 kg gewaschen werde.

### Protac Kugeldecke™ Flexible

- Artikelnummern 100-201, 100-205, 100-202, 100-206 können in einer Waschmaschine mit einer Mindestkapazität von 6 kg gewaschen werden. Die Beutel/Netz mit Kugeln werden aus dem Bezug genommen. Bezug und Beutel werden separat gewaschen. Siehe im Übrigen die Waschanleitung im Bezug.

### Protac Kugeldecke™ Calm

- Artikelnummern 100-321, 100-322 sollen zweigeteilt und jeder Teil in einer Waschmaschine mit einer Mindestkapazität von 6 kg gewaschen werden. Schleuderdrehzahl der Waschmaschine auf ein Minimum einstellen! Wäschebeutel oder Wäschenetz oder verwenden falls vorhanden. Siehe im Übrigen die Waschanleitung in der Decke.

## Reinigungsempfehlung

**Schonendes Schleudern:** Schleuderdrehzahl der Waschmaschine auf ein Minimum einstellen um unnötige Reibung zwischen Stoff und die harten Kugeln zu vermeiden.

**Schonend trocknen:** Trocknen an der Luft anstatt im Wäschetrockner.

**Vorteile:** Die Kugeldecken haben so eine längere Lebensdauer und wir sparen Energie.

## Fleckentfernung, Desinfektion

Wenn Sie bei der Entfernung von Flecken Fleckentfernungsmittel verwenden wollen, versuchen Sie dies zuerst an einer nicht sichtbaren Stelle, um festzustellen, ob der Stoff Schaden nimmt oder Farbveränderungen auftreten. Protac empfiehlt, keine Fleckentfernungsmittel zu verwenden. Kontaktieren Sie uns gern, falls Sie Fragen bezüglich geeignete Mittel für Fleckenentfernung oder Desinfektionsmittel haben.

Protac behält sich bei falscher Handhabung im Zusammenhang mit Wäsche und Pflege einen Ersatz vor.

## Transport und Aufbewahrung

Die Protac Kugeldecke™ wird in einer Tragetasche geliefert, sodass sie einfach zu handhaben ist.

Die Protac Kugeldecke™ ist bei der Lieferung gebrauchsbereit.

Wenn die Decke nicht gebraucht wird, muss sie ordentlich in der Tragetasche aufbewahrt werden, sodass sie vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt ist.

## Garantie

Auf Herstellungsfehler werden 2 Jahre Garantie gewährt.

Die Garantie entfällt in folgenden Fällen:

- Überbeanspruchung die Protac Kugeldecke™
- exzessiver Gebrauch die Protac Kugeldecke™
- fehlende oder falsche Pflege die Protac Kugeldecke™

Nachverfolgbarkeit: auf dem Waschlablel sind Monat und Jahr der Herstellung angegeben.